



Livocab®

ECTOMED Nasenspray

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker.

1 Was ist Livocab Ectomed Nasenspray und wofür wird es angewendet?

Livocab Ectomed Nasenspray ist ein Medizinprodukt, das den Naturstoff Ectoin® enthält. Es kann zur unterstützenden Behandlung von nasalen Symptomen bei Allergien angewendet werden.

Es spült und beruhigt die gereizten Nasenschleimhäute, ohne in die Zellen einzudringen. Die Lösung entfaltet eine doppelte Wirkung: Einerseits hilft sie Allergene von den Nasenschleimhäuten zu entfernen, andererseits beruhigt sie die gereizten Nasengänge. Das Ectoin® bildet einen luftdurchlässigen Hydrofilm auf der Nasenschleimhaut und wirkt gleichzeitig pflegend, während es die natürliche körpereigene Schutzbarriere unterstützt.

Livocab Ectomed Nasenspray besteht zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Es enthält Alpinsalz, Wasser und den Naturstoff Ectoin®. Ectoin® wird aus Mikroorganismen gewonnen, die in extremen und unwirtlichen Umgebungen überleben können (z. B. Geysire, Salzseen, Wüsten).

Livocab Ectomed Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Livocab Ectomed Nasenspray ist frei von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln.

2 Was sollten Sie vor der Anwendung von Livocab Ectomed Nasenspray wissen?

- Livocab Ectomed Nasenspray sollte nicht nach Nasenoperationen oder Nasenverletzungen angewendet werden.

• Livocab Ectomed Nasenspray sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegen Ectoin® oder einen anderen Bestandteil des Nasensprays angewendet werden. Falls allergische Reaktionen auftreten, muss die Anwendung von Livocab Ectomed Nasenspray sofort abgebrochen werden. Aus hygienischen Gründen sollte jede Flasche mit Nasenspray nur von einer Person verwendet werden.

• Wechselwirkungen zwischen Livocab Ectomed Nasenspray und sonstigen Antiallergika sind nicht bekannt.

3 Was ist während der Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Aktuell liegen keine Daten vor, was den Gebrauch von Livocab Ectomed Nasenspray während der Schwangerschaft und Stillzeit anbelangt.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Medizinprodukt verwenden, wenn Sie:

- schwanger sind oder stillen
- nicht sicher sind, ob Sie schwanger sind

4 Wie ist Livocab Ectomed Nasenspray anzuwenden?

Wenden Sie Livocab Ectomed Nasenspray immer genau wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben an. Wenden Sie sich vor dem Gebrauch an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie unsicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, je nach Bedarf mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch sprühen.

Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren sollten bei der Anwendung von Livocab Ectomed Nasenspray von einem Erwachsenen unterstützt werden.

Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Bitte ziehen Sie die Schutzkappe von der Flasche ab.

Um sicherzustellen, dass die Pumpe funktioniert, sprühen Sie das Produkt probeweise in die Luft, bevor Sie es erstmalig verwenden, und auch dann, wenn Sie es eine Woche oder länger nicht verwendet haben. Halten Sie die Flasche vom Gesicht abgewandt, und drücken Sie den Sprühaufsatz herunter, bis sich ein feiner Nebel bildet.

- a. Putzen Sie sich vorsichtig die Nase, damit die Nasenflügel frei sind.
- b. Halten Sie die Flasche in einer aufrechten Position, wobei der Zeige- und der Mittelfinger auf einer beliebigen Seite der Fingerauflagen ruhen; der Daumen ruht auf dem Flaschenboden. Beugen Sie Ihren Kopf leicht nach vorne, und schließen Sie ein Nasenloch, indem Sie es sanft mit einem Finger zuhalten.
- c. Beginnen Sie ruhig durch das andere Nasenloch einzuatmen.
- d. Drücken Sie den Sprühaufsatz schnell und mit festem Druck vollständig nach unten, damit das Spray in das Nasenloch gelangt, und lassen Sie den Sprühaufsatz dann los. Atmen Sie weiterhin ruhig durch das Nasenloch ein und aus.
- e. Führen Sie die Spitze der Sprayflasche in das andere Nasenloch ein.
- f. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte für das andere Nasenloch.
- g. Wischen Sie die offenliegende Spitze der Flasche mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab.
- h. Verschließen Sie die Flasche wieder.

5 Welche Nebenwirkungen durch Livocab Ectomed Nasenspray sind möglich?

Livocab Ectomed Nasenspray ist gut verträglich und kann ohne das Risiko eines Gewöhnungseffekts verwendet werden. Es sind keine regelmäßig auftretenden oder anhaltenden Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die mit dem Gebrauch von Livocab Ectomed Nasenspray verbunden sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker bzw. den Hersteller des Produkts.

Sollten die Symptome anhalten oder sich weiter verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

6 Wie sollten Sie Livocab Ectomed Nasenspray lagern?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden. Nicht länger als 6 Wochen nach Anbruch verwenden.

Nicht über 25 °C lagern.

7 Inhaltsstoffe und weitere Informationen

10 ml Lösung

Bestandteile

2,0 % Ectoin®, 0,9 % Alpinsalz und Wasser

Ein Sprühstoß enthält 0,14 ml Lösung.

Hersteller und Vertrieb

Johnson & Johnson GmbH
Johnson & Johnson Platz 2
41470 Neuss, Deutschland
Tel. 00800 260 260 00 (kostenfrei)



Stand der Information: August 2015